

Ohrmarkenzange Total Tagger

1. Platzieren Sie die weibliche Ohrmarke (visuell oder elektronisch) unter den Federclip, indem Sie den Hebel herabdrücken.


Die elektronische Ohrmarke hat eine leichte Ausbuchtung auf der bedruckten Vorderseite. Positionieren Sie die Ohrmarke so, dass die Ausbuchtung aus dem offenen Ende der Zange herauschaut und die Öffnung zum Dorn hinzeigt. Sollten Sie diesen Punkt nicht beachten, könnte die Ohrmarke falsch positioniert werden.

Visuelle
Ohrmarke



mit Einsatz

Elektronische
Ohrmarke

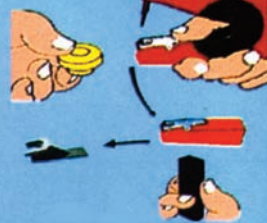


ohne Einsatz


Tauchen Sie die Ohrmarke in eine antiseptische Lösung. Dies erleichtert die Anbringung und fördert die Heilung.



Platzieren Sie die Ohrmarke in die Mitte zwischen Ohrspitze und Kopf und zwischen die Knorpel.

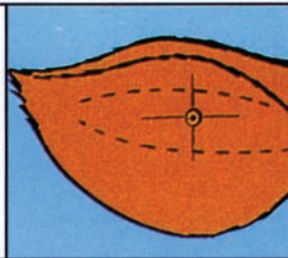

Stecken Sie das männliche Stück auf den Dorn.

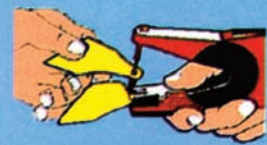

Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, drücken Sie die Ohrmarke fest zusammen, bis die beiden Teile einrasten. Das männliche Stück wird dabei immer von hinten (außen) am Ohr befestigt.

