

Montage- anleitung



Sicherheit durch Qualität
für Weide und Stall

Fahrvorrichtung CA04 für Squeeze Chute S04

Enthält
wichtige Hinweise!
Zum künftigen
Gebrauch gut auf-
bewahren!



Mit freundlicher Genehmigung des Tierparks Nordhorn
www.tierpark-nordhorn.de

TEXAS TRADING GmbH
Landsberger Straße 33 · 86949 Windach
Telefon 08193/9313-0 · Fax 08193/9313-33
TEXAS TRADING GmbH, Windach, Copyright© 2013

WWW.TEXAS-TRADING.DE

Montageanleitung


Fahrvorrichtung CA04 für Behandlungsstand Squeeze Chute S04

Die Fahrvorrichtung dient zum Transport des Behandlungsstandes Squeeze Chute S04. Achtung: Nur zum innerbetrieblichen Einsatz, keine Straßenzulassung, entspricht nicht der StVO.


Die Fahrvorrichtung besteht aus folgenden Teilen:

- ▀ Achse für Behandlungsstand
- ▀ Befestigungsplatten
- ▀ U-Rahmen mit Rädern, Anhängerkuppelung und Scharnieren mit Befestigungsbolzen


Montage der Achse

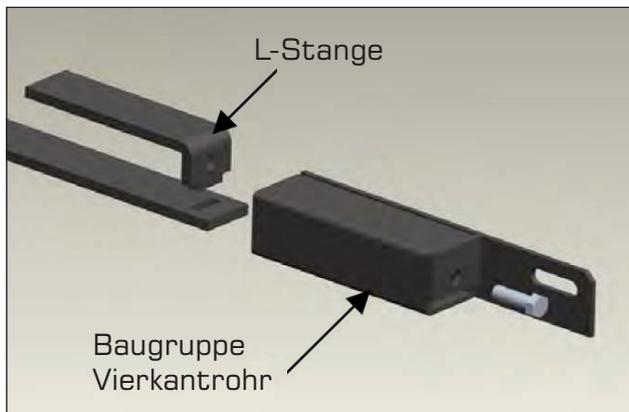


1. Vierkantrohr und L-Winkel an beiden Seiten abschrauben

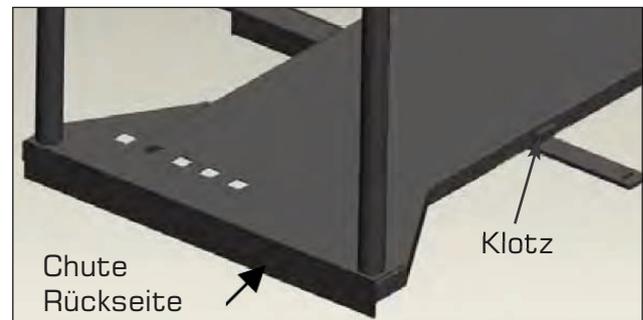


2. Im hinterem Drittel der Chute ist an den beiden Seiten des Bodenbleches ein vier-eckiger Klotz angeschweißt. An dieser Stelle die Achse unter die Chute schieben

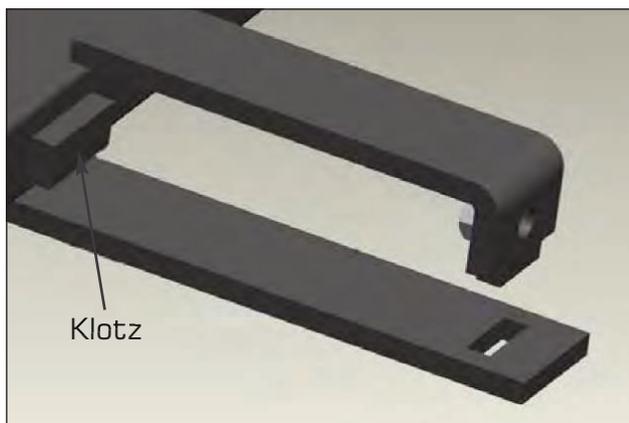

3. langes Ende des L-Winkels auf den Klotz setzen und kurzes Ende in die dafür vorgesehene Bohrung stecken

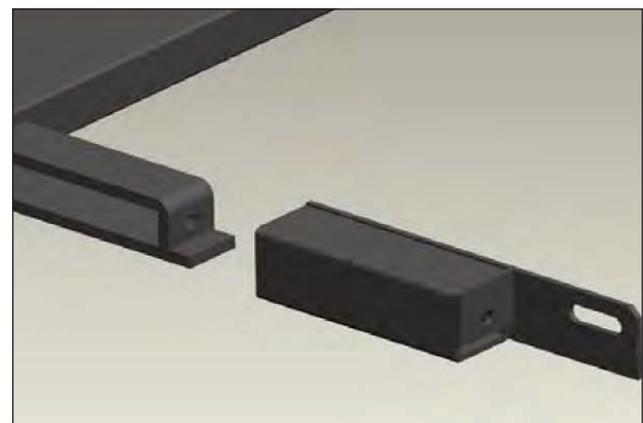

4. Vierkantrohr über den L-Winkel und die Achse schieben

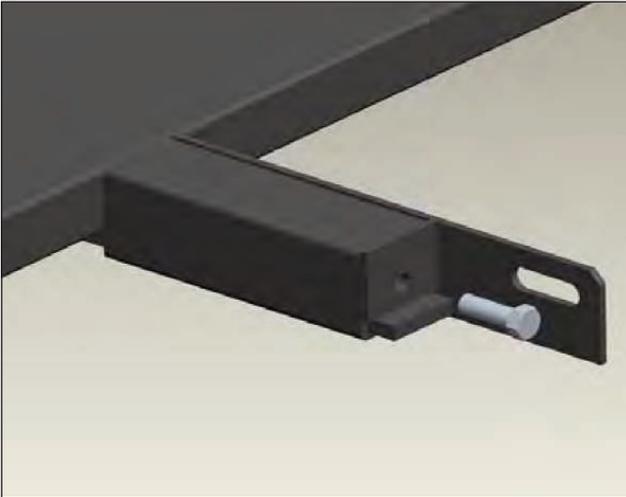

5. Vierkantrohr mit Schraube in dafür vorge-
sehener Bohrung festschrauben.
An der gegenüberliegenden Seite genauso
verfahren.




Mit freundlicher Genehmigung des
Tierparks Nordhorn
www.tierpark-nordhorn.de

Behandlungsstand
Squeeze Chute mit fertig
montierter Achse
für Fahrvorrichtung




Montage der Befestigungsplatten

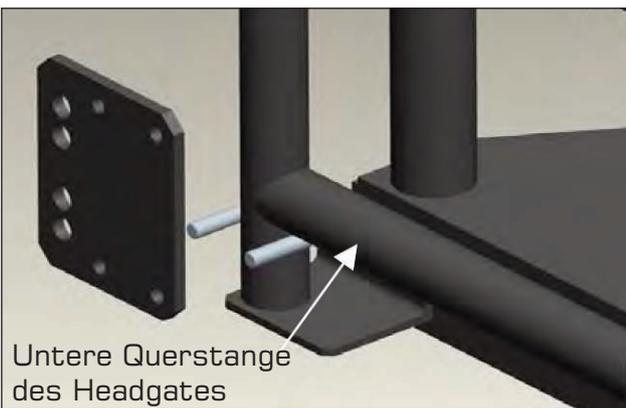


Untere Querstange
des Headgates


1. Bügelschraube direkt unter der unteren
Querstange des Headgates anbringen

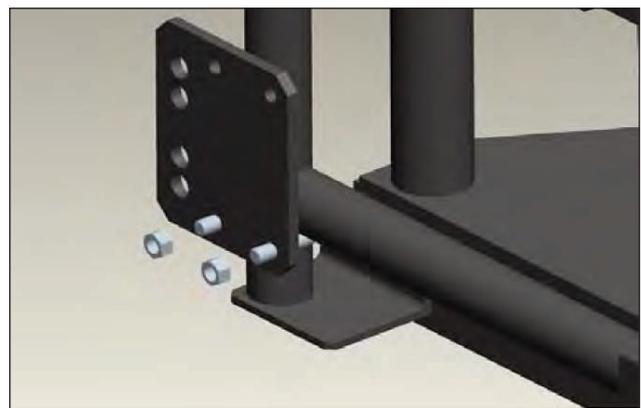

2. Befestigungsplatte an der Bügelschraube
mit den Muttern festziehen – die seit-
lichen Bohrungen der Befestigungsplatte
müssen dabei nach außen schauen.

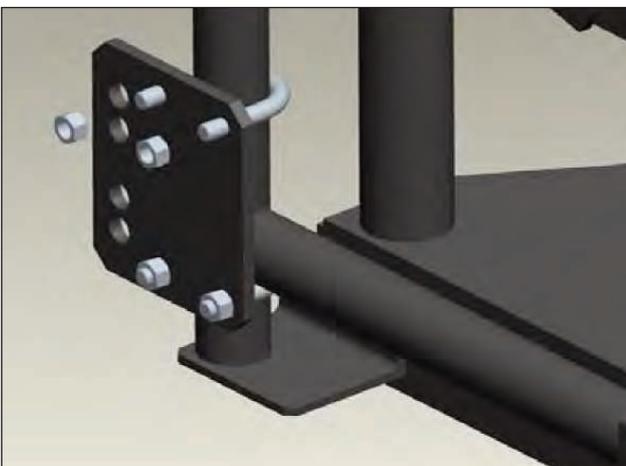

3. Obere Bügelschraube befestigen

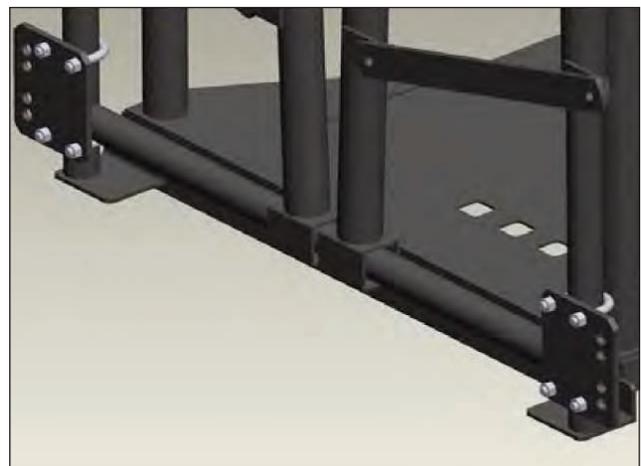

Die zweite Befestigungsplatte genauso an
der gegenüberliegenden Seite anbringen

Montage der Räder mit Anhängerkupplung



Mit freundlicher Genehmigung des Tierparks Nordhorn www.tierpark-nordhorn.de

- Nachdem Befestigungsplatten und Achse montiert sind, mit der Fahrvorrichtung so vor den Stand stellen, dass die U-Öffnung zum Headgate zeigt.
- Die Fahrvorrichtung an der Anhängerkupplung soweit nach hinten schieben, bis die schrägen Aufnahmen an der Hinterseite der Fahrvorrichtung auf Höhe der Achsenschlitz sind.
- Die Aufnahmen in die Achsenschlitz einführen.
- Nun die Vorderseite der Fahrvorrichtung so weit nach unten führen, indem auf die Anhängerkupplung nach unten gedrückt wird, bis die Scharniere mit Befestigungsbolzen der Fahrvorrichtung auf Höhe der Befestigungsplatten sind.
- Jetzt die Bolzen der Fahrvorrichtung in die dafür vorgesehen Bohrungen der Befestigungsplatten führen für einen festen Halt des Standes an der Fahrvorrichtung.
- Der Behandlungsstand kann jetzt an der Anhängerkupplung an ein Zugfahrzeug angebracht werden.



Mit freundlicher Genehmigung des Tierparks Nordhorn www.tierpark-nordhorn.de

Achtung

Beim Abnehmen der Chute vom Zugfahrzeug kippt der Behandlungsstand nach vorne. Ein Helfer an der Hinterseite der Chute kann dem vorbeugen und beim Absenken nach hinten behilflich sein.

Zum Entfernen der Fahrvorrichtung die Bolzen ziehen, dann die Fahrvorrichtung langsam nach oben führen, bis der Stand auf dem Boden bleibt und die hinteren Aufnahmen aus dem Achsenschlitz gezogen werden können.

Achse und Befestigungsplatten können am Stand verbleiben. Sie behindern nicht die normale Verwendung.